



## Präparationsvorgabe für die Präparation von Zirkonoxid-Restaurationen

Ideal ist eine Stufenpräparation mit abgerundetem Innenwinkel oder eine Hohlkehlpriparation von 1,0 mm Substanzabtrag. Um einen optimalen Scanprozess zu ermöglichen, sollten Winkel von  $\geq 5^\circ$  (horizontal) und  $\geq 4^\circ$  (vertikal) eingehalten werden. Okklusal ist eine Reduktion von 1,5 - 2,0 mm vorteilhaft, um die Mindestschichtstärken von Verblend- und Gerüstkeramik einhalten zu können.

Die empfohlene Mindestwandstärke für Zirkongerüste beträgt 0,5 mm. Unter Umständen ist aus Stabilitätsgründen eine Verstärkung der Gerüstwandung bei mehrspannigen Brücken notwendig.

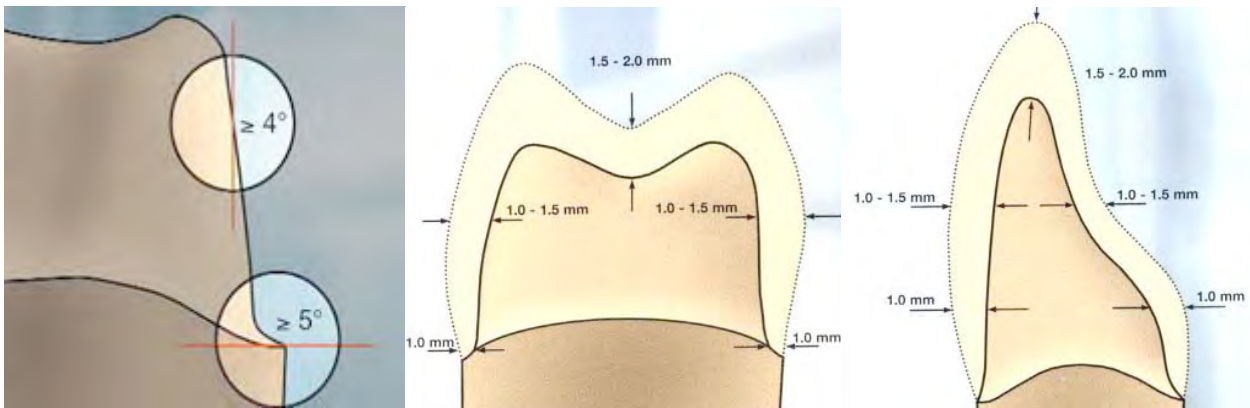

Günstige Gestaltung des Präparationsrandes

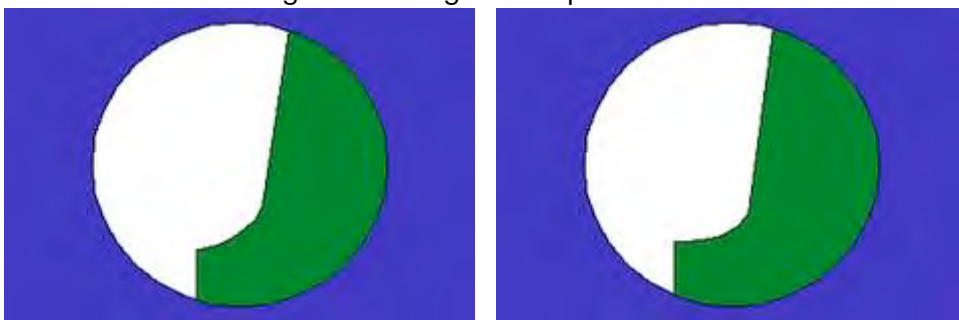

Ungünstige Gestaltung des Präparationsrandes

