


## DIE LÖSUNG: MAXCEM ELITE™ CHROMA

DER ERSTE ZEMENT, DER IHNEN SAGT, WANN ES ZEIT IST, ZU VERSÄÜBERN.



Als erster selbstätzender/selbstadhäsiver Kompositzement, der einen **Versäuerungs-Farbindikator** bietet, ist Maxcem Elite Chroma einer der intelligentesten Zemente, der heute auf dem Markt erhältlich ist.

Die rosa Farbe verschwindet beim Gelzustand und zeigt Ihnen so das optimale Zeitfenster für die Entfernung von Zementüberschüssen an.

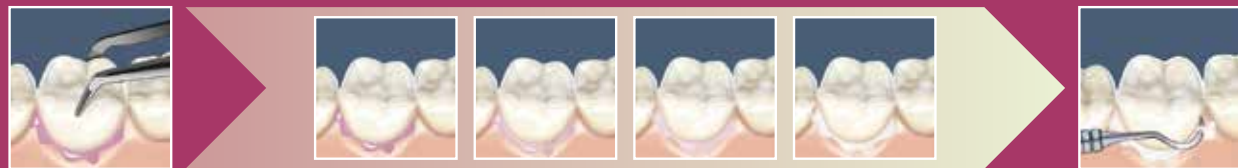

Setzen Sie die Restauration ein und halten Sie sie mit mäßigem Druck fest. Lassen Sie den Zement aus allen Rändern abfließen.

Während er aushärtet, ändert sich die Zementfarbe von rosa zu weiß. Bei der Zementfarbe Gelb ändert sich die Farbe von rosa zu elfenbeinfarben.

Wenn die rosa Farbe verblasst ist, entfernen Sie die Zementüberschüsse unter Aufrechterhaltung des Drucks auf die Restauration.

Maxcem Elite Chroma ist kompatibel mit allen indirekten Restaurationen und bildet eine stabile und haltbare Verbindung mit einer breiten Palette von zahnärztlichen Substraten, einschließlich:

FRONT- ODER SEITENZAHNKERAMIKEN

VMKS

METALLRESTAURATIONEN

CAD/CAM-MATERIALIEN

## UNTERSCHIEDLICHE LÖSUNGEN, DIE GLEICHE QUALITÄT

### MAXCEM ELITE™ CHROMA

Selbstadhäsiver Kompositzement mit Versäuerungs-Farbindikator

#### Bahnbrechende Technologie

Intelligenter Zement, der rosafarben eingebracht wird und sich zum Zementfarbton ändert.

Versäuerungs-Farbindikator zeigt, wann Zementüberschüsse zu entfernen sind.

Rosa verschwindet sowohl nach Selbst- als auch nach Lichthärtung für maximale Flexibilität.

Klassenbeste Haftung beim Vergleich mit anderen Zementen. Selbstätzendes, selbstadhäsives Komposit, kompatibel mit allen indirekten Restaurationen.

280 % Röntgenopazität für einfache Identifikation auf Röntgenbildern. One-Peel™-Versäuerung, einfache Aufbewahrung, keine Kühlung erforderlich.



ERHÄLTICHE FARBEN:  
Klar, Weiß, Gelb

### MAXCEM ELITE™

Selbstadhäsiver Kompositzement

#### Einfach und vielseitig

Ein selbstätzender, selbstadhäsiver Kompositzement für indirekte Restaurationen ist Einfachheit in Vollendung.

Bis zu 90 % höhere Haftfestigkeit! als die vorherige Formulierung.

Vorhersagbare Handhabung und außergewöhnlich bequeme Anwendung.

Klassenbeste Haftung im Vergleich zu anderen führenden selbstadhäsiven Zementen.

One-Peel™-Versäuerung, kein Mischen von Hand und keine Kühlschränklagerung erforderlich.

Intraorale und Wurzelkanalspitzen für die Abgabe in schwer zugänglichen Stellen.



ERHÄLTICHE FARBEN:  
Klar, Weiß,  
Weiß-Opak, Gelb

### NX3

Universeller adhäsiver Kompositzement

#### Ästhetik

Indiziert für die definitive Befestigung aller indirekten Anwendungen.

Hervorragende Handhabungseigenschaften.

Lichthärtungsmöglichkeit und einfache Versäuerung.

Erhältlich in fünf Farben.

Try-in-Gele passen sowohl zum dual- als auch zum lichthärtenden Zement.

Universell: Kann mit einem Total-etch-, einem selektiv ätzenden oder einem selbstätzenden Bondingsystem verwendet werden.



ERHÄLTICHE FARBEN:  
Klar, Weiß, Bleach,  
Weiß-Opak, Gelb

#### Maxcem Elite Chroma - Standard-Kit

INHALT: 4 x 5-g-Spritzen (2 x Clear (klar), 1 x White (weiß), 1 x Yellow (gelb)); 16 x Automisch Ansätze (Normal); 8 x Automisch Ansätze (breit); 8 x intraorale Spitzen; 8 x Wurzelkanalspitzen; Technikanleitung.

Art.-Nr.	Beschreibung
36371	Maxcem Elite Chroma - Standard-Kit

#### Maxcem Elite Chroma - Nachfüllpackungen

INHALT: 2 x 5-g-Spritzen; 8 x Automisch Ansätze (Normal); 8 x Automisch Ansätze (breit); 8 x intraorale Spitzen; Technikanleitung.

Art.-Nr.	Beschreibung
36372	Maxcem Elite Chroma - Clear (klar)
36373	Maxcem Elite Chroma - White (weiß)
36374	Maxcem Elite Chroma - Yellow (gelb)

#### Quellen

1. Korsch M, Robra B, Walther W. Cement-associated signs of inflammation: retrospective analysis of the effect of excess cement on peri-implant tissue. Int J Prosthodont. 2015;28(1):11-18. 2. Wilson T. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study. J Periodontol. 2009;80(9):1388-1392. 3. Korsch M, Walther W. Peri-implantitis associated with type of cement: a retrospective analysis of different types of cement and their clinical correlation to the pre-implant tissue. Clin Implant Dent Relat Res. 2015;17(suppl 2):e434-e443. 4. Brown W, et al. Bond strength of several self-adhesive cements to enamel and dentin. IADR. 2015.

#### Maxcem Elite Chroma - Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
36375	40 x Automix-Aufsätze (Regular)
36376	8 x intraorale Aufsätze & Automix-Aufsätze (breit)
36377	8 x Wurzelkanalaufsätze; 8 x Automix-Aufsätze (breit)

## Maxcem Elite™ Chroma

Self-Etch / Self-Adhesive Resin Cement with Cleanup Indicator



DER EINZIGE ZEMENT,  
DER IHNEN SAGT,  
WANN ES ZEIT IST,  
ZU VERSÄÜBERN

## VERSÄUBERN: SIE DENKEN NICHT GROSS DARÜBER NACH, BIS ETWAS SCHIEFGEHT.

Das Versäubern ist ein Aspekt Ihrer Tätigkeit, der Sie nicht weiter beschäftigt. Doch wenn das Timing entscheidend ist, kann es Ihre Restauration gefährden, wenn Sie den richtigen Zeitpunkt verpassen.

## WAS KANN PASSIEREN?<sup>1-3</sup>



LOCKERUNG DER KRONE



ENTZÜNDUNG DES WEICHGEWEBES



REZSSION DES ZAHNFLEISCHS



KRESTALER KNOCHENVERLUST



PERIIMPLANTITIS

## WENN DAS ROSA VERSCHWINDET, IST ES ZEIT, ZU VERSÄUBERN.

### VERSÄUBERUNGS-FARBINDIKATOR


Der Zement ist beim Einbringen rosa und verblasst allmählich zur Zementfarbe, was Ihnen das optimale Zeitfenster für die Entfernung von Zementüberschüssen anzeigt.



### HOHE HAFTFESTIGKEIT

- Zuverlässig und vorhersagbar<sup>4</sup>
- Klassenbeste Haftung im Vergleich zu anderen führenden selbstadhäsiven Zementen<sup>4</sup>
- 90 % höhere Haftfestigkeit an Dentin<sup>4</sup>
- 65 % höhere Haftfestigkeit an Schmelz<sup>4</sup>
- Bildet eine starke und anhaltende Verbindung mit verschiedenen zahnärztlichen Substraten<sup>4</sup>

Daten in Akten. Calibra Universal, G-CEM LinkAce, PANAVIA SA Cement Plus und RelyX Unicem 2 sind die Marken oder eingetragenen Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

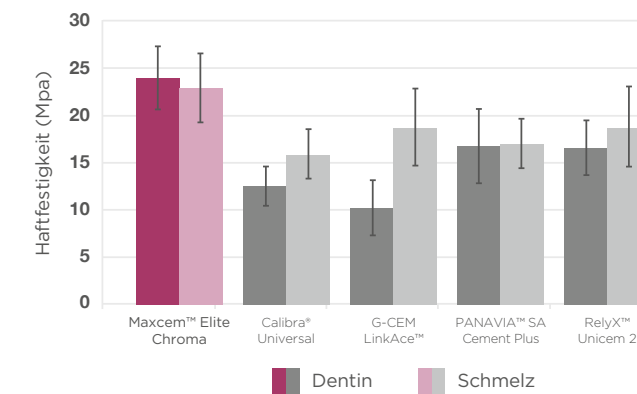

### VERWENDUNG MIT GEWÜNSCHTEN SUBSTRATEN

- Zirkonoxid
- Gold
- Rexillum
- Lithium-Disilikat
- Keramik
- Komposit
- Titan




### AUTOMIX-ABGABESYSTEM

- Automix-Spritzensystem mit Doppelkolben
- Inklusive Einweg-Automix-Spitzen
- Optionale gebogene Spitzen bringen die gewünschte Menge von Zement in die Restauration und/oder Zahnpräparation ein



### LANGFRISTIGE FARBSTABILITÄT

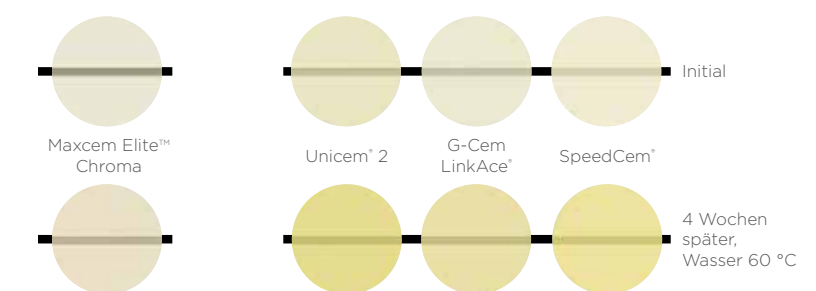

### DUALHÄRTEND

Rosa verschwindet sowohl nach Selbst- als auch nach Lichthärtung und ermöglicht so maximale Flexibilität



### 280 % RÖNTGENOPAZITÄT

Herausragende Röntgenopazität ermöglicht einfaches Wiedererkennen auf einem Röntgenbild



### ONE-PEEL™ VERSÄUBERUNG

- Zement lässt sich einfach in einer Schicht entfernen
- Reduziert die Gefahr des Belassens von Zementüberschüssen



### EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Keine Kühlung erforderlich