



## DESINFEKTIONSMITTEL auf einen Blick:

|                               | Reinigung | Desinfektion | bakterizid | begrenzt vizuzid* | spozizid | fungizid | tuberkulozid | HBV-wirksam | HCV-wirksam | HIV-wirksam | aldehydfrei | phenolfrei | alkoholfrei | gebrauchsfertige Lösung | Konzentrat | Anwendungskonz. in% | Einwirkzeit | VAH gelistet | Anmerkungen   |
|-------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|---|
| <b>HÄNDE</b>                  |           |              |            |                   |          |          |              |             |             |             |             |            |             |                         |            |                     |             |              |   |
| Händedesinfektion             |           | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            |                     |             | X            | Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden<br>Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion: 5 Minuten |
| Waschlotion soft              | X         |              |            |                   |          |          |              |             |             |             |             | X          | X           |                         |            |                     |             |              |   |
| <b>FLÄCHEN</b>                |           |              |            |                   |          |          |              |             |             |             |             |            |             |                         |            |                     |             |              |   |
| Sprühdesinfektion Plus        | X         | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            |                     | 1,0'        | X            |   |
| Sprühdesinfektion alkoholfrei | X         | X            | X          | X                 |          | X        |              | X           | X           | X           | X           | X          | X           | X                       |            |                     | 1,0'        | X            |   |
| Desinfektionstücher Plus      | X         | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | -                       | -          | -                   | 1,0'        | X            |   |
| Wet Wipes Maxi AF             | X         | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | -                       | -          | -                   | 2,0'        | X*           | * Tränkflüssigkeit VAH gelistet   |
| Wet Wipes Soft                | X         | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | -                       | -          | -                   | 2,0'        | X*           | * Tränkflüssigkeit VAH gelistet   |
| Wet Wipes Soft alkoholfrei    | X         | X            | X          | X                 |          | X        |              | X           | X           | X           | X           | X          | X           | -                       | -          | -                   | 2,0'        | X*           | * Tränkflüssigkeit VAH gelistet   |
| Flächendesinfektion Plus      | X         | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           |             | X           | X           | X          |             | X                       |            | 3                   | 15,0'       | X            |   |
| <b>INSTRUMENTE</b>            |           |              |            |                   |          |          |              |             |             |             |             |            |             |                         |            |                     |             |              |   |
| Bohrerbad Plus                | X         | X            | X          | X                 | X        | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            |                     | 5,0'        | X            |   |
| Instrumentenbad Plus          | X         | X            | X          | X                 | X        | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            | 1,5'                | 15,0'       | X            |   |
| <b>SPEZIALBEREICHE</b>        |           |              |            |                   |          |          |              |             |             |             |             |            |             |                         |            |                     |             |              |   |
| Septoprint Plus               |           | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            |                     | 1,0'        | X            | TbB: 15 Min.  |
| Septoprint Konzentrat         |           | X            | X          | X                 |          | X        | X            | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            | 2                   | 15'         | X            | TbB: 4% - 15 Min.   |
| Mundspülbeckenreiniger AF     | X         | X            | X          |                   |          | X        | X            |             |             |             | X           |            |             | X                       |            |                     | 1,0'        |              |   |
| Ultrasuc Super                | X         | X            | X          | X                 |          | X        |              | X           | X           | X           | X           | X          |             | X                       |            | 2                   | 5,0'        | X            |   |
| Ultrasuc Super Cleaner        | X         |              |            |                   |          |          |              |             |             | X           | X           |            |             | X                       |            | 5-10                | 0,5-2 h     |              |   |



## ANSETZEN DER DESINFEKTIONSLÖSUNGEN:

|      | 0,1%  | 0,25%   | 0,5%  | 1,0%   | 1,5%   | 2,0%   | 3,0%   | 4,0%   | 5,0%   | 6,0%   |
|------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 l  | 1 ml  | 2,5 ml  | 5 ml  | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  | 60 ml  |
| 2 l  | 2 ml  | 5 ml    | 10 ml | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml | 120 ml |
| 3 l  | 3 ml  | 7,5 ml  | 15 ml | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml | 180 ml |
| 4 l  | 4 ml  | 10 ml   | 20 ml | 40 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml |
| 5 l  | 5 ml  | 12,5 ml | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml |
| 6 l  | 6 ml  | 15 ml   | 30 ml | 60 ml  | 90 ml  | 120 ml | 180 ml | 240 ml | 300 ml | 360 ml |
| 7 l  | 7 ml  | 17,5 ml | 35 ml | 70 ml  | 105 ml | 140 ml | 210 ml | 280 ml | 350 ml | 420 ml |
| 8 l  | 8 ml  | 20 ml   | 40 ml | 80 ml  | 120 ml | 160 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml | 480 ml |
| 9 l  | 9 ml  | 22,5 ml | 45 ml | 90 ml  | 135 ml | 180 ml | 270 ml | 360 ml | 450 ml | 540 ml |
| 10 l | 10 ml | 25 ml   | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 600 ml |

Für die richtige Dosierung soll Ihnen diese Verdünnungstabelle eine Hilfe sein. Die Gesamtmenge der Desinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsmittel und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel: Es sollen 2 l einer 1%igen gebrauchsfertigen Instrumenten-Desinfektionslösung hergestellt werden. Wenn Sie hierzu in der Tabelle unter 2 l und 1,0 % nachsehen, finden Sie die Menge 20 ml.

Messen Sie nun diese 20 ml Desinfektionsmittel in einem Messgefäß ab. Geben Sie die 20 ml in die Instrumentenwanne und füllen Sie Wasser bis auf 2 l auf. Auf diese Weise erhalten Sie eine korrekt angesetzte 1%ige gebrauchsfertige Lösung.