

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Plus
Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement

Sekundenschnelle Entfernung von Zementüberschüssen

Ketac Cem Plus Automix – Komfort plus Leistung



Dank Kurzzeit-Lichtpolymerisation jetzt noch leichter Überschüsse entfernen.

Ketac™ Cem Plus kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement (RMGI) von 3M™ bietet die perfekte Kombination aus komfortabler Anwendung und bewährter klinischer Leistung. Der Zement eignet sich besonders gut für die Befestigung von Verblend-Metall-Keramiken (VMK) und Restaurationen auf Implantat-Abutments.

Die praktische Automixspritze vereinfacht die Anwendung.

Es gibt gute Gründe, der Automixspritze den Vorzug zu geben: Die moderne Automixspritze ermöglicht eine sehr einfache Anwendung von Ketac Cem Plus. Dank der einzigartigen Materialeigenschaften und der einfachen Überschussentfernung wird für Sie die Befestigung mit kunststoffmodifiziertem Glasionomer-Zement jetzt leichter ist als je zuvor.



www.dentaladvisor.com

Vorteile

Kurzzeit-Lichtpolymerisation der Überschüsse

- Schnellere und einfachere Überschussentfernung
- Lang anhaltende Fluoridabgabe
- Automixspritze – die von Kunden bevorzugte Applikationsform



Indikationen

- Kronen, Brücken, Inlays und Onlays aus Metall oder verblendeter Metallkeramik
- Kronen und Brücken aus Aluminium- oder Zirkonoxid
- Endodontische Stifte und kieferorthopädische Bänder aus Metall
- Kronen und Brücken auf Implantatabutments



Ketac Cem Plus wird für die Befestigung von Restaurationen auf Implantat-Abutments empfohlen.

Sekundenschnelle Entfernung von Zementüberschüssen

Einfache Entfernung von Zementüberschüssen innerhalb von Sekunden.


Wenn Sie Ketac Cem Plus 5 Sekunden lang pro Oberfläche mit einem Elipar™ DeepCure-S LED Polymerisationsgerät von 3M™ oder einem anderen handelsüblichen Polymerisationsgerät vergleichbarer Leistung anhärten, geht der überschüssige Zement direkt in einen Gelzustand über. Alternativ können Sie auch warten, bis der Überschuss von selbst aushärtet – ungefähr zwei Minuten nach dem Einsetzen der Restauration in den Mund. Wenn überschüssiger Ketac Cem Plus Zement einen Gelzustand erreicht hat, lässt er sich spielend leicht in wenigen Stücken von den Rändern entfernen.



Kurzzeit-Lichtpolymerisation von Ketac Cem Plus zur leichten Überschussentfernung.



Leichtes Entfernen von überschüssigem Zement in wenigen Stücken.

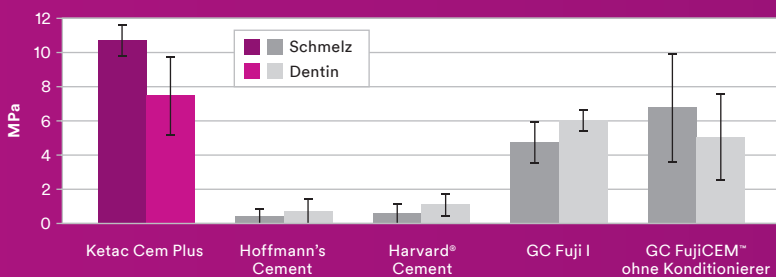


Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten zeigt Ketac Cem Plus hohe Werte für die Scherfestigkeit auf Schmelz/Dentin.

Haftfestigkeit.

Ketac Cem Plus ermöglicht einen molekularen Haftverbund mit der Zahnoberfläche. Im Vergleich zu anderen führenden Zementen zeigt Ketac Cem Plus außergewöhnliche Werte für die Scherfestigkeit – ohne separaten Konditionierer. Zudem treten praktisch keine postoperativen Sensitivitäten auf.

Quelle: 3M, interne Daten 2012 (Kerb-Haftfestigkeitsprüfung).*

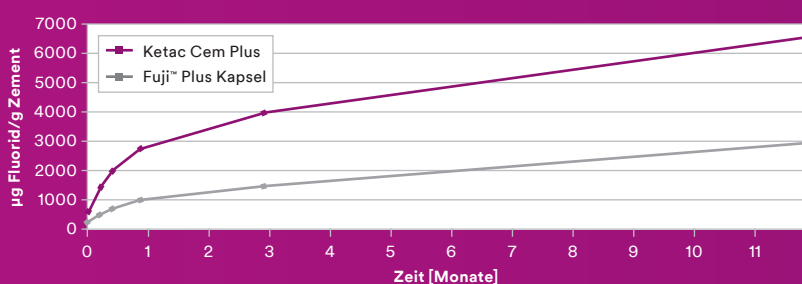

Ketac Cem Plus bietet langanhaltende Fluoridabgabe.

*Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

Fluoridabgabe.

Ketac™ Cem Plus bietet langanhaltende Fluoridabgabe.

Quelle: Teilweise zitiert aus: Ton T, Wang Y, Falsafi A, Oxman J. Fluoride Release of a Novel Automix Resin-Modified Glass-Ionomer Luting Cement (Fluoridabgabe eines neuartigen kunststoffmodifizierten Glasionomer-Befestigungszements in einer Automixspritze). J Dent Res 91 (Spec Iss A) 1319, 2012 (www.dentalresearch.org).*

Bestellinformation



Ketac Cem Plus Automix



Ketac Cem Plus Clicker

Art.-Nr.	Produktinformation
	3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Plus Automix Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement
3536TK	Trial Kit 1 Spritze à 8,5 g, 12 Mischkanülen
3536	Value Pack 3 Spritzen à 8,5 g, 36 Mischkanülen
3541	Refill Packung Mischkanülen 12 Stück
	3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Plus Clicker™ Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement
56931	Trial Kit 1 Clicker Dispenser (11 g), 1 Anmischblock
56930	Refill Packung 2 Clicker Dispenser (à 11 g), 1 Anmischblock

Unser bewährter Ketac Cem Glasionomer-Befestigungszement

	3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Aplicap™ Glasionomer-Befestigungszement
56053	Intro Kit Ketac Cem Aplicap 50 Kapseln, 1 Aplicap Aktivator, 1 Aplicap Applikator
56060	Refill Packung 50 Aplicap Kapseln
	3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Maxicap™ Glasionomer-Befestigungszement
56015	Intro Kit Ketac™ Cem Maxicap 50 Kapseln, 1 Maxicap Aktivator, 1 Maxicap Applikator
56020	Refill Packung 50 Maxicap Kapseln



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/oralcare

3M Schweiz GmbH
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon

Telefon: (044) 7249331
Telefax: (044) 7249238
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/oralcare

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Telefon: (01) 86686434
Telefax: (01) 86686330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/oralcare