

Pro und Prime Line

Legends. Reborn. Die neuen
Klasse B und S Autoklaven.



#1

Die meistverkauften
Autoklaven der Welt:
Jetzt FAIRbessert!

NEU

auch als Klasse S
Autoklaven

Profi-Klasse

HAT EINE ÄRA GEPRÄGT

Weltweit verkauft. Weltweit geliebt. Weltweit der einzige familiengeführte Hersteller von Autoklaven der ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert. Mit über 300.000 verkauften Autoklaven begeistert die Profi-Klasse seit Jahrzehnten mit herausragender MELAG Qualität - Made in Germany. Es ist Zeit, den meistverkauften Klassiker neu zu erfinden.

Pro und Prime Line

ZEIT FÜR EINE NEUE ÄRA

Sie kennen die Autoklaven der Profi-Klasse? Dann werden Sie die neuen MELAG Geräte-Generationen lieben - von den Funktionen bis zum Preis! Denn die Pro Line (als Klasse B oder S Autoklaven) und Prime Line (als Klasse B Autoklaven) bleiben ihrer Linie treu: Herausragende Performance, smarte Funktionen sowie ein modernes und extrem robustes Design sind serienmäßig. Denn ein Autoklav darf niemals ausfallen. Wir gehen deshalb bei der Qualität keine Kompromisse ein und entwickeln unter höchsten Qualitätsanforderungen an unserem Firmensitz in Berlin.



- +** **Qualität – Made in Germany**
für eine maximale Zuverlässigkeit im Praxis-Alltag
- +** **Beeindruckende Geschwindigkeit**
gemäß EN 13060 für zeitsparende Workflows
- +** **Optimale Trocknungsergebnisse**
zum Schutz vor Re-Kontamination und Korrosion
- +** **Kompromissloser Komfort**
für eine einfache und sichere Handhabung
- +** **Smartes Dokumentationskonzept**
für einen lückenlosen und rechtssicheren Nachweis
- +** **Zukunftsweisende Innovationen**
zur massiven Einsparung von Strom und Wasser
- NEU** **Ideal für Ihr Budget und Instrumentarium**
mit Sterilisationsverfahren der Klassen B und S



Made in
Germany

Made in Germany. Made for You.

Zukunft braucht Herkunft: Seit über 70 Jahren entwickeln, produzieren und optimieren wir unsere Systemlösungen zur Instrumenten-Aufbereitung am Hauptstandort Berlin. Denn MELAG steht für Ingenieurskunst und Produktion „Made in Germany“ auf höchstem Qualitätsniveau.

~~UN~~ **BEZAHLBAR!**

Sterilisation FAIRbessert

Bieten mehr. Brauchen weniger.

Egal ob Beladung, Sterilisation oder Dokumentation – die neuen, kompakten MELAG Autoklaven der Klasse B und S bieten ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das keine Vergleiche scheut. So sterilisieren Sie nicht nur mehr Instrumente in kürzerer Zeit, sondern sparen dabei auch jede Menge Geld. Und das alles in der MELAG Qualität, die Sie von den bewährten Vorgänger-Modellen der Profi-Klasse kennen und schätzen.



Mehr
PERFORMANCE.

25% günstiger in der Anschaffung
reduziert Ihre Kosten ab Tag 1.*

50% weniger Wartungen
durch verlängerte Service-Intervalle von 2 Jahren
oder 2.000 Zyklen.*

96% geringerer Wasserverbrauch
durch das zukunftsweisende Stand-alone Konzept
mit einer hocheffektiven Luftkühlung.**

35% kürzere Zykluszeiten
ermöglichen effiziente Hygiene-Workflows und somit
mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Ihre Patienten.*

15% mehr Beladung
auf bis zu 5 Tablett geben Ihnen die Flexibilität im
Praxis-Alltag, die Sie benötigen: Jetzt und in der
Zukunft.*

100% intuitivere Bedienung
mit Smart-Touch Display, LED-Statusanzeige und
Dokumentation per USB-Stick wird alles einfach
einfacher.

Weniger
KOSTEN.



Wir lieben die Praxis-Hygiene. Und die Umwelt.

Die Pro und Prime Line vereinen Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit. Dank wegweisendem Stand-alone Konzept, Power Save Energiesparmodus und DRYtelligence Trocknung (enthalten in der Prime Line) werden unsere Autoklaven die sauberste Lösung – für Ihr Budget und die Umwelt.



Quick-Fact: Sie benötigen einen Autoklaven zur Sterilisation
von noch größeren Beladungsmengen in Rekordzeit?

Dann profitieren Sie von unserer Premium-Klasse Evolution
mit weltweit einzigartigen Produkt-Highlights.



*Im Vergleich zu den Vorgängermodellen der Profi-Klasse.

**Im Vergleich zu den Vorgängermodellen der Profi-Klasse mit Festwasser-Anschluss.

2 Größen. 6 Modelle. Unendliche Möglichkeiten.

So vielseitig wie Sie.

Um dem individuellen Praxisbedarf gerecht zu werden, sind die neuen MELAG Autoklaven in den Größen 17 oder 23 Liter sowie mit unterschiedlich ausgeprägtem Funktionsumfang lieferbar.

Pro Line (Klasse B oder S Autoklaven)

NEU

Vacuclave 118 / 118 S & Vacuclave 123 / 123 S

Unsere Einstiegsmodelle: Die Pro Line bietet als Klasse B oder S Autoklav alles für eine sichere, komfortable und ressourcenschonende Sterilisation.



Leistungsstarkes Vakuumverfahren der Klasse B oder S

Zuverlässige Sterilisation von bis zu 6 kg auf 5 Tablett in nur 15 bis 28 Minuten (zzgl. flexDRY Trocknung ab 1 min) – Made in Germany.



Smart-Touch Display mit LED-Status

Touchscreen mit intuitiver Menüstruktur für eine einfache Bedienung wie bei Ihrem Smartphone – sogar mit Handschuhen.



Konnektivität und Datenprotokollierung

Erfüllung rechtlicher Anforderungen durch Protokollierung der Sterilisationsparameter per USB und Netzwerk oder Protokollausdruck per MELAprint 80.



Stand-alone Gerätekonzept

Integrierte Wassertanks und hocheffektive Luftkühlung für standortunabhängigen Betrieb ohne Kühlwasser.



Power Save Energiesparmodus

Ruhezustand von Heizung und Display zwischen den Sterilisationen für eine Top-Energieeffizienz.



EasyCare Routinekonzept

Anwenderfreundliche Optimierungen für effizienten Filtertausch, Tankreinigung und Wasserversorgung.

Vacuclave 318 & Vacuclave 323

Unsere Preis-Leistungssieger: Die Prime Line überzeugt als Klasse B Autoklav zusätzlich mit hohen Beladepkapazitäten, exzellent guten Trocknungsergebnissen und erweiterten Freigabefunktionen.



Heavy Duty-B Programm

Bleiben Sie rundum flexibel: Die Prime Line bietet eine herausragende Kapazität für bis zu 8 kg Beladung.



DRYtelligence Trocknung

Die algorithmusgesteuerte Trocknung sichert optimale Ergebnisse und gleichzeitig eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %.



ProControl Freigabe

Bye Bye Steri-Buch! ProControl ermöglicht die Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung direkt am Display ohne extra Software.



Barcode-Etikettendruck

Mit MELAprint 80 erfolgt der Ausdruck von Barcode-Etiketten für die Kennzeichnung und lückenlose Rückverfolgung der Instrumente.



Prime Line (Klasse B Autoklaven)

Haben mehr drauf als sie kosten.



Jetzt noch mehr sparen:

Die Klasse S Autoklaven der Pro Line bieten eine noch preiswertere Alternative für Praxen und Kliniken, die wegen der verwendeten Instrumente keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Vacuclave 118 S und Vacuclave 123 S sterilisieren sogar verpackte Instrumente mit einfachen Hohlkörpern (z. B. Gelenkinstrumente wie Scheren und Nadelhalter).



Aus Kombinieren wird Profitieren.

Die MELAG Systemlösung

Jede Praxis ist einzigartig. Mit individuellen Systemlösungen sind wir als der Partner an Ihrer Seite, auf den Sie sich verlassen können. Profitieren Sie vom perfekten Zusammenspiel der MELAG Thermodesinfektoren, Siegelgeräte, Autoklaven und Softwarelösungen. So lassen wir Ihre Ideen vom zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden.



Persönlich:

Ein zentraler Ansprechpartner bei Rückfragen zur Instrumenten-Aufbereitung



Effizient:

Kostenoptimierung durch Synchronisierung des Service für alle Geräte im Aufbereitungsraum



Prozessoptimiert:

Aufeinander abgestimmtes Bedienkonzept zur Vermeidung von Fehlern im Praxisalltag



Als Produkt einzigartig, im System unschlagbar:



✓ Reinigung & Desinfektion mit MELAtherm



✓ Verpackung mit MELAseal oder MELAstore



✓ Dampf-Sterilisation mit Vacuclave



✓ Dokumentation & Freigabe mit MELAtrace



✓ Kennzeichnung mit MELAprint 80

Finden Sie das richtige Zubehör für sich. Und für Ihren Vacuclave. So flexibel wie Ihr Bedarf

Dank vielfältigem Zubehör können Sie sich ganz einfach die Konfiguration zusammenstellen, die am besten zu Ihnen passt. Vacuclave bietet so maximale Sicherheit und Effizienz – ideal abgestimmt auf Ihren individuellen Prozess der Instrumenten-Aufbereitung.



Überzeugt auf ganzer Linie:
Entdecken Sie die Vorteile unserer
neuen Pro und Prime Line

www.melag.com

1. Wählen Sie Ihre Beladungskonfiguration:

Für die optimale Nutzung der Sterilisationskammer bieten wir abgestimmte Beladungssysteme.




Halterung A Plus

zur Aufnahme von fünf Tablett für Einzel-Instrumente oder drei MELAstore Boxen 100 für Instrumenten-Sets.



Halterungen:
Art.-Nr. ME82630 für 45 cm tiefen Kessel
Art.-Nr. ME82620 für 35 cm tiefen Kessel

Tabletts:
Art.-Nr. ME00230 für 45 cm tiefen Kessel
Art.-Nr. ME00280 für 35 cm tiefen Kessel

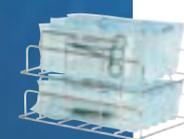

Folienhalter

ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von verpackten Instrumenten für optimale Trocknungsergebnisse.

Art.-Nr. ME22420 für 45 cm tiefen Kessel
Art.-Nr. ME22410 für 35 cm tiefen Kessel



Chamber Protect

für die sorgfältige Reinigung der Edelstahlfächen. Das Kesselreinigungsset beinhaltet einen kraftvollen Reiniger, 50 fusselfreie Tücher und 1 Mikrofasertuch.

Art.-Nr. ME01081

2. Wählen Sie Ihre Wasser-Aufbereitung:

MELAdem liefert hochwertiges demineralisiertes Wasser zum optimalen Werterhalt des Autoklaven und der Instrumente.



MELAdem 40

ist eine kompakte Ionenaustauscher-Anlage für Praxen mit bis zu drei Sterilisationszyklen pro Tag.

Art.-Nr. ME01049



MELAdem 47

ist eine leistungsfähige Umkehr-Osmose-Anlage für Praxen mit einem erhöhten Sterilisationsbedarf.

Art.-Nr. ME01047



MELAdem 53 / 53 C

ist eine Wasser-Aufbereitungsanlage mit sehr hoher Kapazität für MELAtherm und bis zu drei weitere Geräte.

Art.-Nr. für MELAdem 53: ME01038
Art.-Nr. MELAdem 53 C: ME01036



MELAJet

ermöglicht das Ab- und Durchsprühen der Instrumente mit demineralisiertem Wasser.*

Art.-Nr. ME27300

*Kompatibel mit MELAdem 40 und MELAdem 53

3. Wählen Sie weiteres Zubehör für die Dokumentation:

Die Pro und Prime Line bietet eine rechtssichere Dokumentation und Freigabe mit integrierten USB- und Netzwerkschnittstellen.



MELAttrace

ermöglicht die professionelle Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung des gesamten Aufbereitungsprozesses.

Jetzt MELAttrace mit 90-tägiger Testlizenz kostenlos von www.melag.com laden



MELAprint 80

druckt Barcode-Etiketten für eine optimale Kennzeichnung und Rückverfolgung mit MELAttrace sowie der Prime Line oder Protokoll-Dateien mit der Pro und Prime Line.

Art.-Nr. ME01108



MELAcontrol Type 5

dient zur Überprüfung der Sterilisationsbedingungen (Dampf, Temperatur und Zeit) und kann sowohl verpackten Instrumenten beigelegt, als auch direkt im Kessel platziert werden.

Art.-Nr. ME01077



MELAcontrol Helix

liefert als Helix-Prüfsystem mit 250 Indikatorstreifen eine zuverlässige Kontrolle des Sterilisationsergebnisses im Typ B Programm.

Art.-Nr. ME01080

Zahlen. Daten. Fakten.

Technische Daten

Die Pro und Prime Line garantieren mit vielfältigen Programmen eine schnelle Sterilisation abgestimmt auf Ihren Bedarf:

NEU	Programme der Pro Line (Klasse S Autoklaven)		Vacuclave 118 S Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Vacuclave 123 S Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Trocknung (zeitgesteuert)
	Universal-S	134 °C, Haltezeit: 5,5 min		18 – 23 min	20 – 25 min
Schnell-S	134 °C, Haltezeit: 3,5 min		13 – 19 min	16 – 20 min	5 min
Schon-S	121 °C, Haltezeit: 20,5 min		33 – 37 min	36 – 38 min	25 min
Prionen-S	134 °C, Haltezeit: 20,5 min		33 – 38 min	35 – 40 min	25 min

Programme der Pro Line (Klasse B Autoklaven)		Vacuclave 118 Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Vacuclave 123 Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Trocknung (zeitgesteuert)
Universal-B	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	20 min
Schnell-S	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	5 min
Schnell-B	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	10 min
Schon-B	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	20 min
Prionen-B	134 °C, Haltezeit: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	20 min

Programme der Prime Line (Klasse B Autoklaven)		Vacuclave 318 Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Vacuclave 323 Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung) *	Trocknung	
				DRYtelligence**	Zeitgesteuert
Universal-B	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	ab 1 min	20 min
Schnell-S	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	ab 1 min	5 min
Schnell-B	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	ab 1 min	10 min
Schon-B	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	ab 1 min	20 min
Prionen-B	134 °C, Haltezeit: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	ab 1 min	20 min
Heavy Duty-B	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	22 – 32 min	24 – 35 min	ab 1 min	30 min

* Angaben beim Schnell-S Programm für unverpackte Beladung und bei allen anderen Programme für einfach verpackte Beladung. Zeiten können je nach Beladungsart und -menge abweichen.

** DRYtelligence passt den Trocknungsprozess automatisch auf Ihre Beladung an. Durch die intelligente Trocknung werden somit jederzeit optimale Trocknungsergebnisse erreicht.

Die Pro und Prime Line lassen sich als Tisch-Autoklaven schnell und einfach in jedem Aufbereitungsraum installieren. Erhalten Sie in der folgenden Auflistung einen Überblick über die technischen Daten:

	Pro Line				Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 118 S	Vacuclave 123	Vacuclave 123 S	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Art.-Nr.	ME10118	ME10118S	ME10123	ME10123S	ME10318	ME10323
Gerätetyp	Stand-alone Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitungsanlage kompatibel)					
Autoklaven-Klasse	Klasse B	Klasse S	Klasse B	Klasse S	Klasse B	Klasse B
Kesselgröße	ø 25 cm x 35 cm lang	ø 25 cm x 35 cm lang	ø 25 cm x 45 cm lang	ø 25 cm x 45 cm lang	ø 25 cm x 35 cm lang	ø 25 cm x 45 cm lang
Kesselvolumen	17 Liter	17 Liter	23 Liter	23 Liter	17 Liter	23 Liter
Beladungsmenge	max. 5 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien	max. 4 kg Instrumente / 1 kg Textilien	max. 6 kg Instrumente / 2 kg Textilien	max. 5 kg Instrumente / 1 kg Textilien	max. 7 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien	max. 8 kg Instrumente / 2 kg Textilien
Geräteabmessungen (B x H x T)	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)					
Gewicht	48 kg	46 kg	49 kg	47 kg	48 kg	49 kg
Stromversorgung	220 – 230 V / 50 – 60 Hz					
Leistungsaufnahme	2.100 Watt					
Dokumentations- schnittstellen	USB, Netzwerk					

Rev.2-25/1462-06.25-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene