


Wichtig

Durch die Verwendung von nicht geeigneten Mitteln können Gerätestörungen oder Beschädigungen entstehen. Garantieansprüche können dadurch erlöschen.

Verwenden Sie keine schäumenden Reinigungsmittel, Scheuermittel sowie chlorhaltige oder lösungsmittelhaltige Produkte (z. B. Aceton).

Achtung:

Pflegen Sie Ihre Sauganlage optimal mit Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra, MD 555 cleaner und MD 555 cleaner organic sowie dem Orocup Pflegesystem. Für Dürr Dental Sauganlagen wurden ausschließlich diese Mittel für die Verwendung getestet und freigegeben!

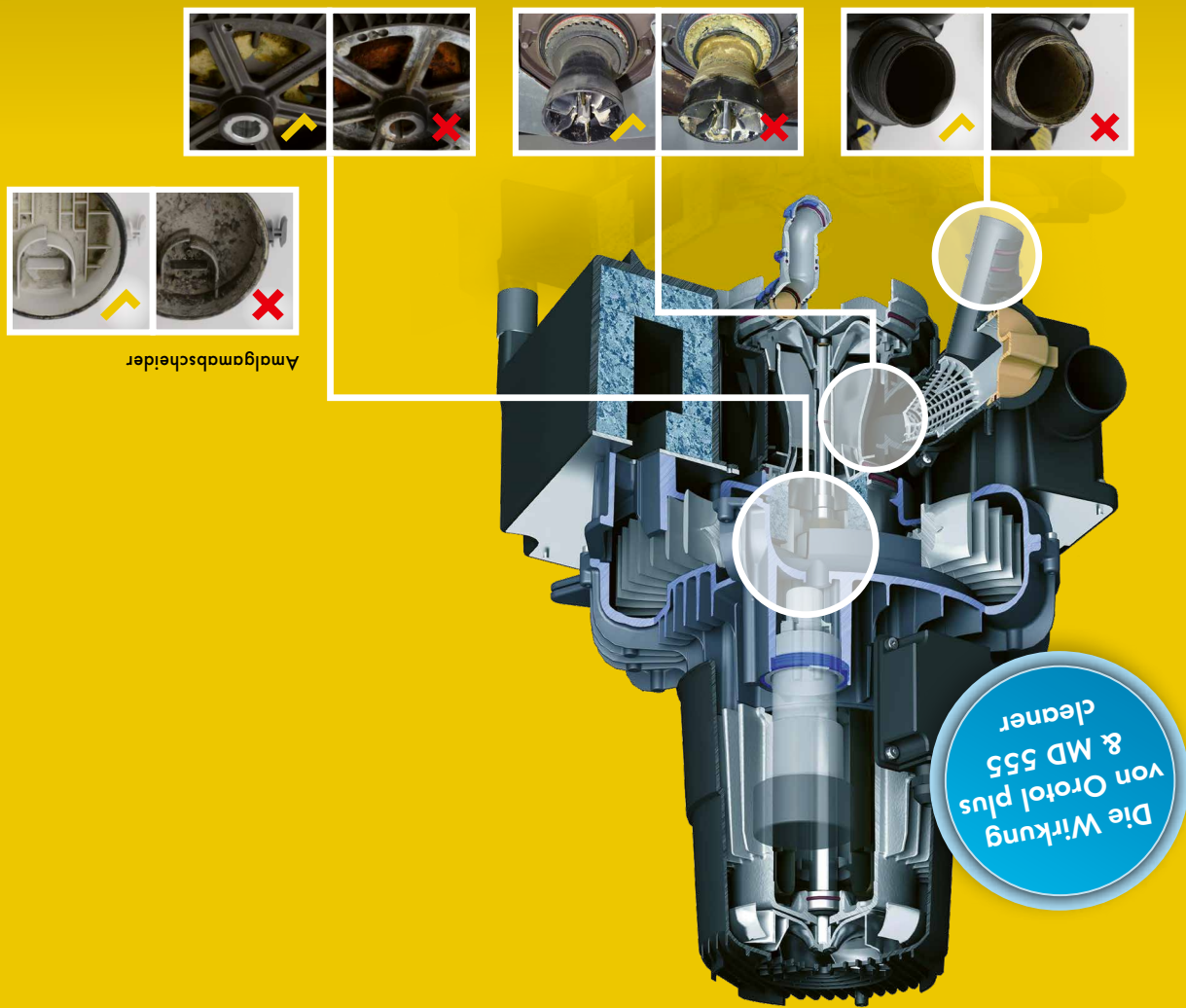Die richtige Pflege

Hygienepower für ein extra langes Leben Ihrer Sauganlage



Sauganlagen-Hygiene
mit Orotol plus & MD 555 cleaner

Tägliche Desinfektion mit Orotol plus oder Orotol plus pH 7

1 – 2 x täglich*

MO DI MI DO FR SA SO

*an allen Öffnungstagen

1 Vorreinigung



2 Liter Wasser absaugen (Achtung: Niemals Wasser über 35° C ins Saugsystem geben!)

Mit den Konzentraten Orotol plus und Orotol plus pH 7 haben Sie die ideale Lösung für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.


Die Anwendung erfolgt am Ende des Arbeitstages, bei höherer Belastung 2 x täglich (mittags und abends).



Tutorial
ansehen



2 Dosierung 2 %

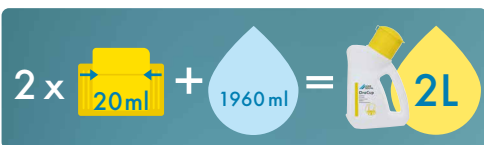

Ansetzen der Lösung (2 %): 40 ml Konzentrat einfüllen, OroCup bis 2L Markierung mit Wasser füllen



3 Desinfektion Saugsystem



Schläuche aufstecken, 1 Liter Lösung absaugen bis Auto-Stop

4 Mundspülbecken



Restliche 1 Liter Lösung ins Mundspülbecken geben

5 Einwirkzeit



5 – 60 Min.
einwirken

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, begrenzt
viruzid (behüllte Viren inkl. HBV,
HCV, HIV und Coronaviren)
sowie unbehüllte Adenoviren
und Noroviren

6 Spülung Behandlungseinheit



Bei Wiederinbetriebnahme 2 Liter Wasser absaugen

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM


Wöchentliche Reinigung mit MD 555 cleaner oder MD 555 cleaner organic

min. 2 x / Woche*

MO DI MI DO FR SA SO

*bei kürzerer Einwirkzeit täglich

1 Vorreinigung

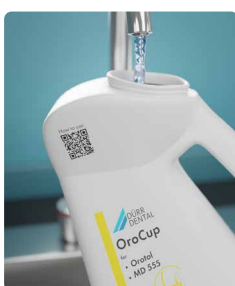

2 Liter Wasser absaugen (Achtung: Niemals Wasser über 35° C ins Saugsystem geben!)

MD 555 cleaner und MD 555 cleaner organic sind Ihre Spezialreiniger für Sauganlagen und Amalgamabscheider. Sie verfügen über starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen, Verkrustungen und Verschlämmungen.


Anwendung mindestens 2 x wöchentlich (z. B. Di und Do, ergänzend zu Orotol plus). Alternativ täglich mit kürzerer Einwirkzeit ideal vor Behandlungsbeginn.




Tutorial
ansehen



2 Dosierung 5 %

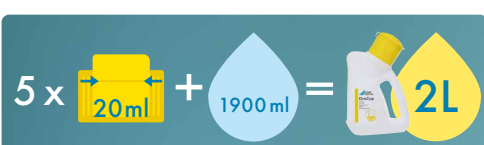

Ansetzen der Lösung (5 %): 100 ml Konzentrat einfüllen, OroCup bis 2L Markierung mit Wasser füllen

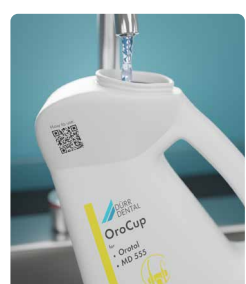

3 Reinigung Saugsystem



Schläuche aufstecken, 1 Liter Lösung absaugen bis Auto-Stop

4 Mundspülbecken



Restliche 1 Liter Lösung ins Mundspülbecken geben

5 Einwirkzeit



30 – 120 Min.
einwirken

oder



5 – 15 Min.
einwirken

6 Spülung Behandlungseinheit



Bei Wiederinbetriebnahme 2 Liter Wasser absaugen

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM