

## Der entscheidende Unterschied: Zahnaufhellung mit Opalescence Go™!

Ein Anwenderbericht von Zahnärztin Sara Jalili

Zahnaufhellungsprotokolle können ebenso komplex sein wie die Auswahl des passenden Aufhellungsprodukts. Wünschen sich Patienten mit verfärbten Zähnen eine flexible, bequeme und unkomplizierte kosmetische Zahnaufhellung, so ist in unserer Praxis Opalescence Go das Mittel der Wahl. Die Gründe dafür sind einfach und selbsterklärend: das Zahnaufhellungsgel mit 6% Wasserstoffperoxid ist gebrauchsfertig, direkt aus der Packung. Seine Handhabung ist einfach und zuverlässig. Die Tragezeiten sind kurz und die Ergebnisse herausragend. Opalescence Go Whitening ist für nahezu alle Patienten ideal geeignet, sofern nicht zu viele Restaurationen im Frontzahnbereich vorliegen, welche natürlich nicht aufgehellt werden können.



Abb. 1: Opalescence Go Whitening Kit mit 10 vorgefüllten UltraFit Trays.

Wir erhalten regelmäßig und häufig positives Feedback von glücklichen Patienten, deren Lächeln dank Opalescence Go weißer und strahlender geworden ist. Die Opalescence Go Kits enthalten 10 vorgefüllte UltraFit™ Trays mit je 10 Stück für den Ober- und Unterkiefer (Abb. 1). Die Patienten können die Schienen ganz einfach in den Mund einsetzen und die Zahnaufhellung kann sofort beginnen (Abb. 2).



Abb. 2: Patientin mit eingesetzten UltraFit Trays.

Vor dem Beginn der Whitening Behandlung führen wir bei unseren Patienten eine professionelle Zahnreinigung durch, um Flecken, Plaque und oberflächliche Verfärbungen zu entfernen. Im Anschluss daran erhalten die Patienten in der Praxis eine Einweisung in die korrekte Anwendung des Opalescence Go Zahnaufhellungsgels:

1. Nach dem Zähneputzen sollten die UltraFit Trays 60-90 Minuten lang getragen werden.
2. Nach der Einweisung in unserer Praxis kann die Aufhellungsbehandlung zu Hause fortgesetzt werden. Dabei wird in der Regel eine Schiene pro Tag verwendet, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Normalerweise genügen dafür 5-10 Schienen.
3. Dank seiner PF-Formel (Kaliumnitrat und Fluorid) ist das Opalescence Zahnaufhellungsgel sehr schonend. Sensibilitäten treten äußerst selten auf. In diesen Fällen können während und nach der Behandlung fluoridhaltige Lacke oder Gele eingesetzt werden.

Bleiben UltraFit Trays nach dem Erreichen des gewünschten Ergebnisses übrig, können diese im Kühlschrank aufbewahrt und für eine schnelle Auffrischung zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.

Das Opalescence Go Whitening Kit enthält außerdem Opalescence Zahnaufhellungscreme, welche dazu beitragen kann, die helle Zahnfarbe dauerhaft zu erhalten.

Abb. 3 zeigt einen 24-jährigen Patienten vor und nach der Zahnaufhellung mit Opalescence Go. Der Patient war mit dem großartigen Ergebnis nach sieben Tagen und mit seinem neuen, natürlichen Lächeln sehr zufrieden. Die drei übrigen Trays kann er bei Bedarf später verwenden.

Das Opalescence Zahnaufhellungssystem ist bereits seit Jahrzehnten erhältlich. Es ist bei Patienten und Anwendern gleichermaßen bekannt.

Opalescence Whitening Produkte sind ausschließlich in Zahnarztpraxen erhältlich. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen unserer Patienten zu gewinnen.



Abb. 3: Vor und nach der Zahnaufhellung mit dem Opalescence Go Whitening Gel.

## Über die Autorin



**Sara Jalili**  
(Zahnärztin)  
Ensjø Zahnklinik Oslo,  
Norwegen